



聴覚障害を持つ方々がすべての人と同じように
難なく社会活動に参加できるようにする
AIベースの聴覚支援ソリューションです。



株式会社ハード

ホーム画面

追加設定


QRスキャン
場合が利用可能な場合は、QRコード
をスキャンして接続します

利用可能な会場マップ
タップして、Bettearアプリを利用可能な会
場を見付けます

イベントに接続
Bettearソリューションが導入さ
れている会場に到着して、タップ
で接続、聴取を開始します



会場での操作

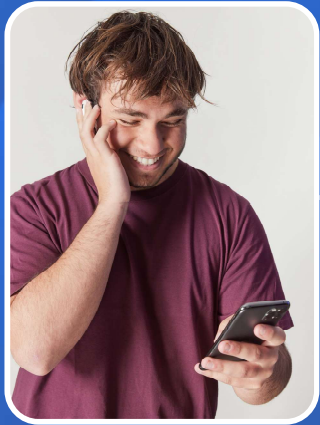

スマホを補聴器・ヘッドホン・
イヤオンの聴取デバイスと接続
して下さい



人工内耳
Cochlear
Implants



補聴器
Hearing
aid



ヘッドホン
Over-Ear
Headphones




イヤオン
Earphones



タップして検索




「Join」を選択して聴取
可能なイベントに接続

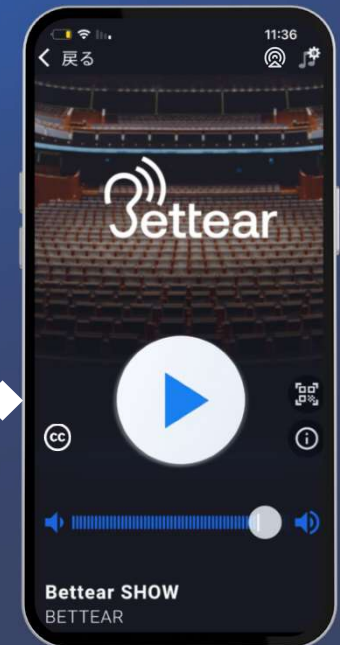

イベントを
お楽しみ下さい

接続後の操作

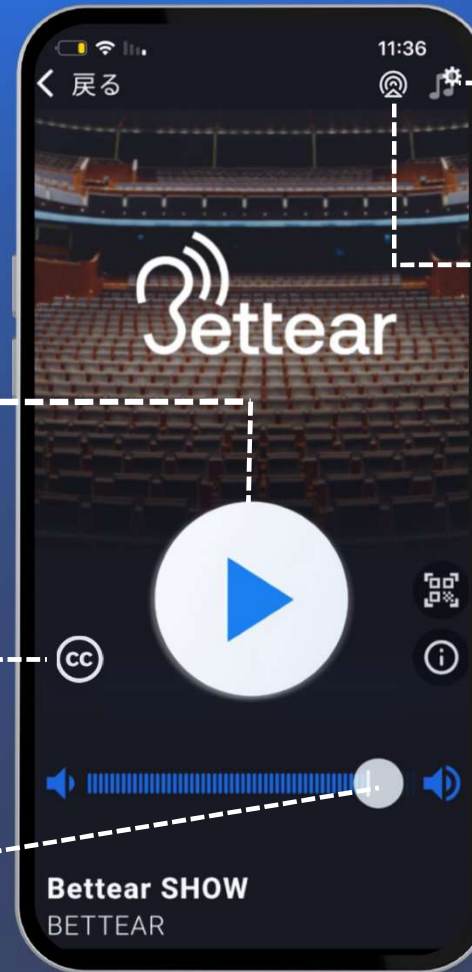

◆ サウンドの追加設定

◆ 聴取デバイスを選択して、
オーディオ配信と接続
(iOS)

◆ タップして、オーディオを「再生」又は「一時停止」


◆ 「CC」をタップし、リアルタイム文字起こしを表示
(会場にて提供されている場合)

◆ 白いアイコンを左右に動かし、音量を調整

◆ タップして、イベントに
関する情報を表示


文字起こし

文字起こしの全画面モード

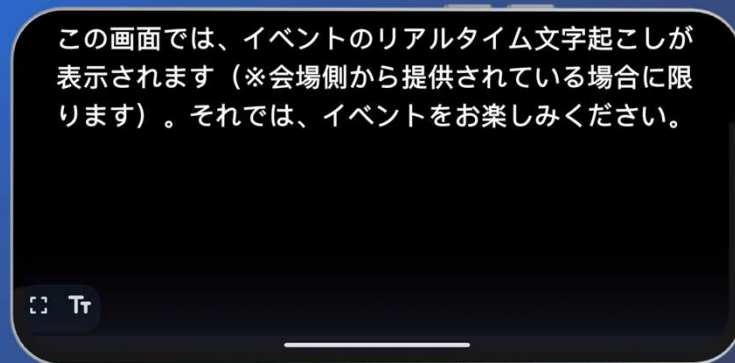

文字のサイズを変更


「CC」をタップして、リアルタイム文字起こしを表示（会場で提供されている場合）

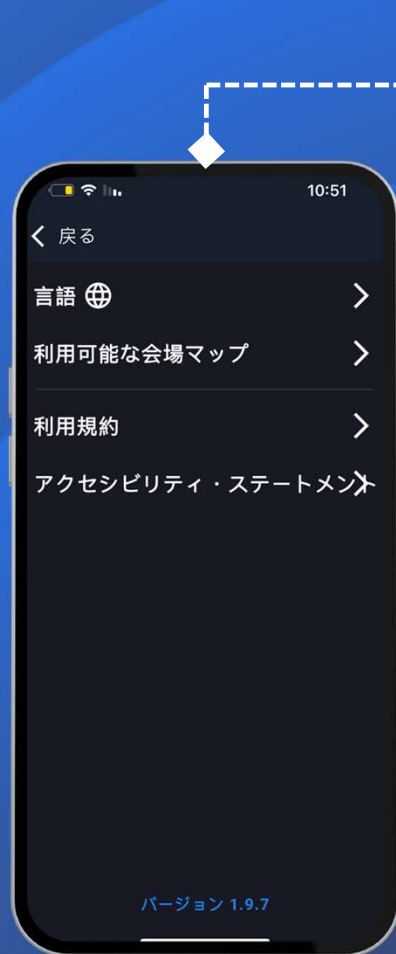

設定

言語の変更、Bettearアプリで聴取可能な会場の検索など

Settings

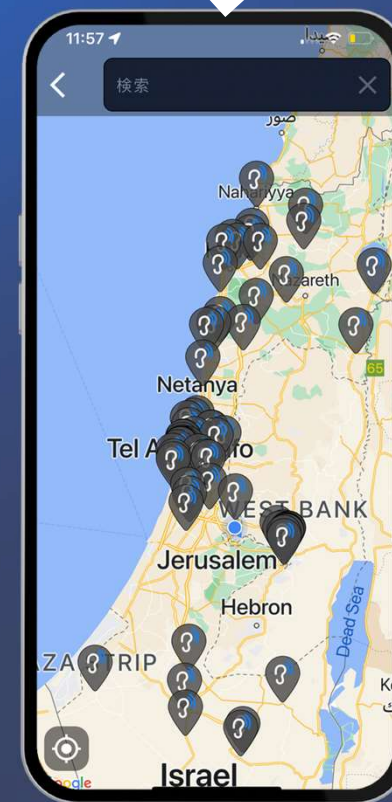


利用可能な会場マップ

マップ上でズームイン、もしくは会場名を入力して検索

Accessibility Map

メイン画面のその他の機能

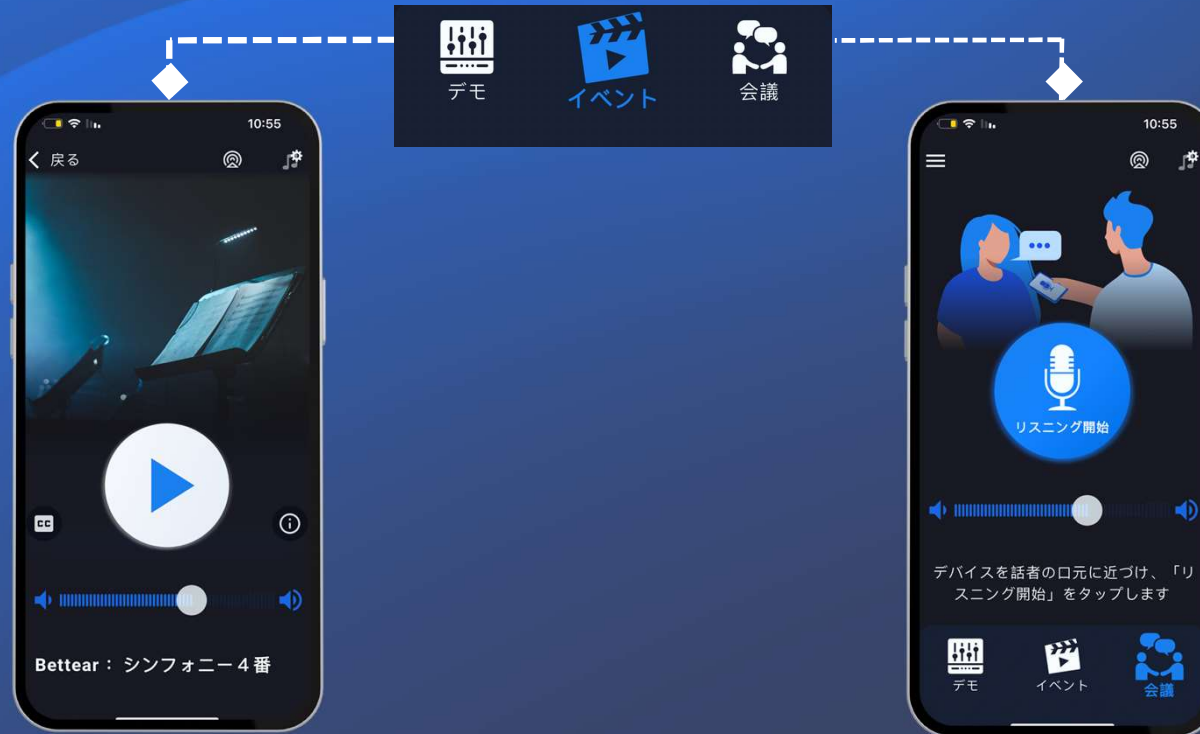

デモモード

前もってご自宅でアプリを体験し、
イベントに備えます


会議モード

騒音環境でも、スマートフォンのマイクを話者の口元に近づけておくと、円滑な対人
コミュニケーションが可能です。 会議機能はいつでもどこでも利用できます。

高度な音声設定

オーディオプロフィール

環境に合わせて聴覚プロフィールを選択

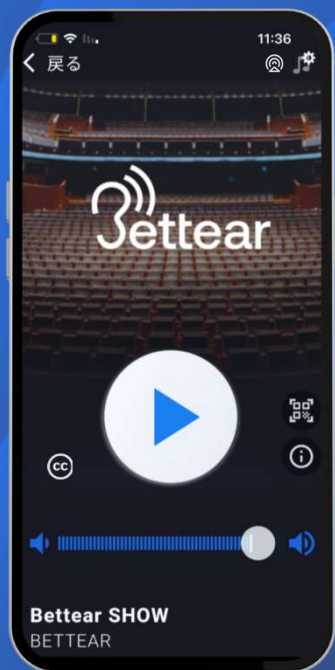

クイック校正
左右それぞれの聴覚に合わせて素早くカスタマイズ



完全な校正


タップして、静かな環境で聴覚テストを行い、自分の聞こえ方に合わせて校正します

Bluetoothデバイスへの音声配信の遅延が発生した場合、
「Bluetoothによる遅延の最適化」を有効にします


音声設定

事前に設定されたプロフィール


異なる種類の一般的な会場に合わせて最適化された既存の音声プロフィールを選択する事で、音質を向上させます

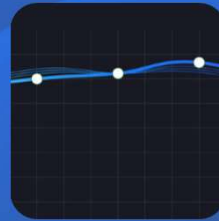


音楽

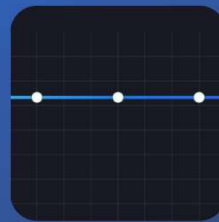

フラット

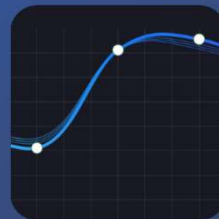


スピーチ

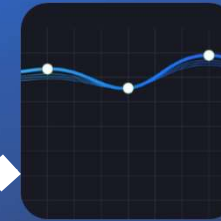

映画

カスタム・プロフィール

会話などの特定の部分を手動で調整し、強調させることで音質を向上させます

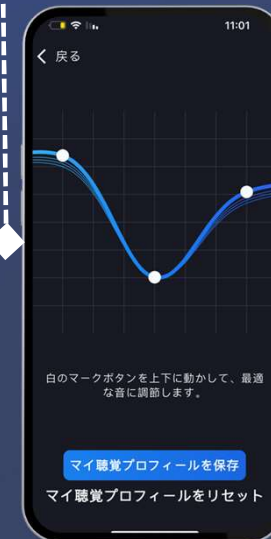

クイック校正

左右の耳で個別にオーディオを素早くカスタマイズできます。
左右のそれぞれの耳に合わせたカスタマイズをすることで、より正確なサウンド調整が可能になります。



完全な(高度な)音声較正



聴覚スクリーニング・テスト(検査)は、パーソナライズされた聴取用の正確な音声較正に必須です。当検査は、250、500 Hz, 及び 1、2、4、と 8 KHz の周波で行われています。なるべく静かな環境で検査を実行して下さい。

ユーザー体験を向上させるヒント

- ・「デモ」機能(メイン画面の下部にあります)を試した後、利用可能な場所に来てください。
- ・ 音声配信を聞きながら、ビデオモードでカメラを使用することは避けてください。
- ・ 不要なアプリを閉じることで、音声配信の音質を向上させます。
- ・ Bluetoothデバイスへの音声配信の遅延が発生した場合、「Bluetoothによる遅延の最適化」を有効にして下さい。
- ・ 反響を避けるため、補聴器アプリケーションで補聴器のマイクピックアップを下げることをお勧めします。