

 **Eyear** system

LA-90

カウンターループ

取扱説明書



こちらの取扱説明書をよくお読みください。
システムを正しくセットアップする方法と、すべてのシステム機能について説明しております。

標準コンポーネント

次のコンポーネントが含まれているかどうかを確認してください。

- ・ バッテリー内臓のポータブル誘導ループシステムLA-90
- ・ 電源ユニット (ACアダプター)
- ・ カラーパネル
- ・ ステッカー 2 枚
- ・ ゴム足 4 つ
- ・ 取扱説明書
- ・ 保証書

欠品がある場合は、すぐに販売店にご連絡ください。

■使い方

LA-90は内臓マイクまたは外部マイクを使用して音を拾い、誘導ループを介して聴取します。発信された信号は、「 T 」または「 MT 」の位置に設定された補聴器もしくは、ヒアリングループ専用受信機で受信できます。

■LA-90

カウンターループシステムは、既に単体で完成しております。LA-90をユーザーと相手の間の位置に置き、電源ユニットを接続するだけです。本機の背面にあるマイクは、話している人の方を向いている必要があることに注意してください。

■デバイスの電源を入れる

カウンターループシステムをオンにするには、デバイスの背面にある「電源オン」ボタンを押します。本機の電源を入れると、本機の背面にある「電源オン」ライトが緑色に点灯し、前面の「電源オン」ライトが青色に点灯します。

■信号のピックアップ/放出


デバイスの背面にあるマイクまたは外部マイクを介して音を拾い、デバイスから磁気信号として発せられると、ステータスライトの「ループ信号」がオレンジ色に点滅します。

■自動スイッチオフ


LA-90は内部または外部マイクから信号が受信されない場合、2分後に自動的にオフになります。

各部名称

正面図

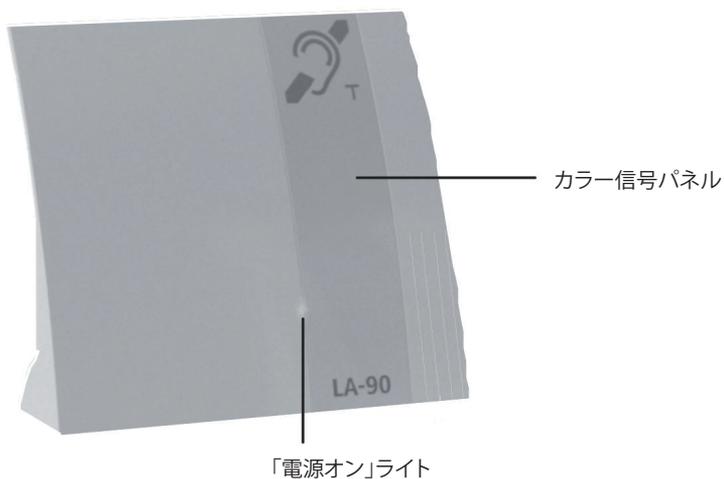

背面図

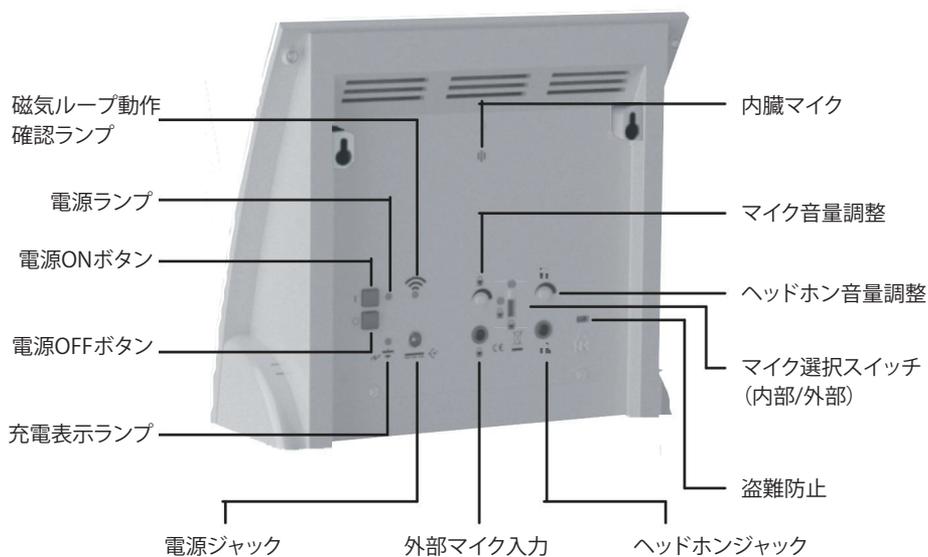

- ・ **外部マイク入力**

外部マイクを接続することができます。(3.5mmプラグ)

- ・ **マイク選択スイッチ**

利用するマイクを選択します。

上：内臓マイク

下：外部マイク

- ・ **マイク調整**

コントロールダイヤルを使用して、マイク入力の感度を調整できます。

- ・ **ヘッドホンジャック**

ヘッドホンなどを接続して音声を聞くことができます。(3.5mmプラグ)

- ・ **ヘッドホン音量調整**

ヘッドホンのボリュームを調整します。

- ・ **充電表示ランプ**

LEDが赤く点滅 : バッテリー充電中

LEDが消灯 : バッテリー充電完了

■LA-90の固定方法

LA-90は、側面の穴を通して卓上または、他の表面にねじで固定することができます。穴はサイドカバーの下にあります。下の図のように、カバーを取り外します。



■デバイスの電源を切る


カウンターシステムをオフにするには、デバイスの背面にある「電源オフ」ボタンを押します。電源ランプが消灯します。

■LA-90の電源

LA-90は、内蔵の充電式バッテリーまたは電源ユニットを使用して操作できます。バッテリーが完全に充電されている場合、デバイスは最大6時間使用できます。消耗したバッテリーは、再びフル容量に達するまで約3時間充電する必要があります。充電中にLA-90を使用することもできますが、バッテリーを完全に充電するのに必要な時間が長くなることに注意してください。


■壁取付け

1. 2本のネジを締めます。（付属されていません）
LA-90を壁に取り付けたい場所で5.55インチ（14.1cm）離します。（図を参照）
2. LA-90をネジにセットし、少し下にスライドさせて所定の位置に固定します。

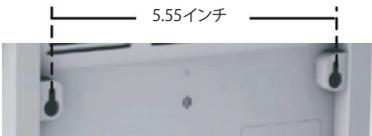

■ カラーパネルの変更

以下に示すように、LA-90のカラーパネルを変更できます。

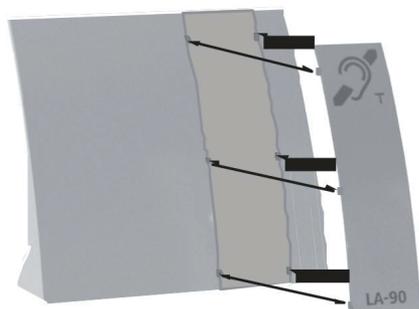

■ メンテナンスとお手入れ

LA-90はメンテナンスを必要としません。ユニットが汚れた場合は、湿らせた柔らかい布で拭いてください。シンナーその他の有機溶剤は絶対に使用しないでください。

直射日光のあたる場所に長時間放置しないでください。また、過度の熱、湿気、及び深刻な機械的衝撃から保護をする必要があります。

注：この製品は水しぶきから保護されていません。水で満たされた容器や火の灯ったろうそくなどの直火のあるものを製品の上または、近くに置かないでください。

■ 仕様

寸法（横 x 奥行 x 高さ）	185 x 75 x 200
重量	635g（バッテリー搭載時）
電源	入力：100～240VAC、50～60Hz 出力：16VDC
充電式バッテリー	12V NiMH
バッテリー駆動動作時間	最大6時間
バッテリー充電時間	約3時間
出力	10W
マイク感度	最大60dB±3dB
CE認証 (EU指令)	2002/95/ EGRoHS 2002/96/ EG WEEE 2004/108/ EG EMC 2006/95/EG低電圧

■保証

LA-90は、非常に信頼性の高い製品です。

ユニットが正しくセットアップされ、操作されているにもかかわらず、誤作動が発生した場合は、販売店にお問い合わせください。

保証は、製品の修理と保証期間中（1年間）の無料返品を対象としています。

製品は元のパッケージで送ることが不可欠になります。

パッケージを捨てずに保管していただきますようお願い致します。

誤った取扱い許可されていない人によるユニットの修理の試み（ユニットのシールの破壊）によって生じた損傷には、保証は適用されません。保証期間中の修理は、同封の保証書に記入して、販売店に返送した場合にのみ実施されます。また、販売伝票のコピーが必要になります。

■ユニット廃棄



仕様済みの電気及び電子ユニットの廃棄（欧州連合諸国およびその他の欧州諸国で個別の収集システムを使用して適用可能）。製品または、パッケージの記号は、この製品が通常のごみとして処理されるのではなく、電気及び電子ユニットのリサイクルのために収集ポイントに戻される必要があることを示しています。この製品を正しく廃棄することにより、健康と環境を保護します。マテリアルリサイクルは、原材料の消費量を削減するのに役立ちます。この製品のリサイクルに関する詳細情報は、地域コミュニティ、共同処分会社または、地域の販売店から受け取ります。

■充電式バッテリーの廃棄



デバイスに付属された充電式バッテリーはリサイクル出来ます。この充電式バッテリーは、その目的のために設計されたレセプタクルに廃棄するか、販売店に返送してください。環境保護のため、完全に放電したバッテリーのみを廃棄してください。

有限会社 **アイアシステム**

<https://www.eyearsystem.com/>

〒132-0024 東京都江戸川区一之江 3-16-21

TEL: 03-3674-5768 FAX: 03-3674-5762